

MANUEL D'UTILISATION

B L U M I L -GO



CE



B L U M I L

Sommaire

INTRODUCTION.....	3
AVERTISSEMENTS DE SECURITE.....	3
ECRAN ET BOUTONS	5
INSTALLER / RETIRER LA BATTERIE	6
CHARGE	7
FIXER BLUMIL GO A UN FAUTEUIL ROULANT	7
AJUSTEMENT DE LA FIXATION	10
FAUTEUIL ROULANT AVEC REPOSE-PIEDS HAUT	10
REGLAGE SUPPLEMENTAIRE.....	11
LA CONDUITE	12
MAINTENANCE DE LA BATTERIE	13
GARANTIE BLUMIL	13

INTRODUCTION

Félicitations! Bienvenue dans la famille BLUMIL!

BLUMIL GO est une solution unique qui vous permet de transformer votre fauteuil roulant manuel rigide en un handbike électrique. Vous pouvez le faire simplement en appuyant sur un bouton.

BLUMIL GO permet à des millions de personnes dans le monde entier de profiter d'un nouveau sens de la liberté.

Attrapez votre casque et faites un tour, vous êtes sur le point de vivre une véritable liberté avec votre BLUMIL GO!

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

Il est de votre responsabilité de lire et de vous assurer de respecter toutes les exigences mentionnées ci-dessous et de connaître tous les risques liés à la conduite décrits dans ce manuel avant de tenter de conduire avec BLUMIL GO

En raison de la possibilité d'atteindre des vitesses élevées, il est recommandé de porter un casque.

- Ne montez pas sur des bordures supérieures à 5 cm.
- Ne roulez pas dans des flaques d'eau ni de l'eau.
- La trottinette ne doit être utilisée que pour transporter une personne à la fois. Toute autre utilisation n'est pas autorisée.
- Il est recommandé de n'utiliser BLUMIL GO que par des personnes ayant la capacité physique et mentale de respecter les exigences liées à la circulation sur voies publiques.
- Veuillez noter que, lors de la conduite sur des voies publiques, le handbike est soumis au code de la route.
- Les débutants doivent faire particulièrement attention en conduisant.
- Familiarisez-vous avec la distance de freinage selon les différentes vitesses.
- Vous devez également vous familiariser avec le code de la route.
- Pour pouvoir vous déplacer de manière régulière en ligne droite, évitez les mouvements brusques quand vous conduisez à grande vitesse ou pendant virage.

- Un véhicule à 3 roues est toujours moins stable qu'un véhicule à 4 roues.
- Le guidon doit être tenu fermement à 2 mains lors de la conduite, du freinage ou d'une manoeuvre. Sinon, il peut y avoir un risque d'accident.
- La vitesse doit être adaptée aux capacités techniques du handbike, des caractéristiques du terrain et aux compétences de l'utilisateur.
- Soyez prudent lorsque vous conduisez sur des trottoirs, des bosses, etc., car handbike peut basculer.
- Le mode de conduite doit être adapté à vos compétences.
- Soyez prudent et conduisez lentement, surtout dans les virages.
- Avant de conduire sur des collines, familiarisez-vous avec le produit sur une surface plane.
- Ralentissez pour atteindre un virage et penchez-vous vers l'intérieur du virage.
- Lors d'un arrêt, par exemple aux passages piétons, aux feux de signalisation, sur les pentes ou sur les rampes, tenez les roues arrière du fauteuil roulant.
- Un fauteuil roulant équipé du Blumil Go a un rayon de braquage supérieur à celui du fauteuil roulant. Il peut donc parfois être impossible de tourner dans des endroits restreints, tels que des couloirs.
- Sur les pentes, l'adhérence de la roue motrice est inférieure à celle des routes plates, ce qui signifie moins de puissance de freinage. La conduite et la vitesse doivent toujours être adaptées aux conditions afin que le produit puisse être arrêté à tout moment, sans risque.
- Pour éviter de tomber, les obstacles tels que les bordures doivent toujours être franchis en marche avant, perpendiculaires et à basse vitesse. La hauteur maximale des obstacles est de 50 mm, mais cela dépend de la distance entre les roues avant et le sol, et donc des paramètres de fixation avec le Blumil GO.
- En cas de déplacement sur des surfaces mouillées, le risque de glissade est accru en raison d'une adhérence des pneus inférieure. Dans cette situation, votre conduite doit être ajustée en conséquence.
- *Rider* avec votre fauteuil roulant et Blumil GO risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles, par une chute, une perte de contrôle, une perte d'équilibre, des collisions et d'autres accidents.
- Ne *rider* pas avec BLUMIL GO à moins de l'avoir bien ajusté à vos besoins.
- N'essayez pas de conduire lorsque l'indicateur de charge de la batterie n'affiche

aucune barre.

- Gardez les éléments tels que les sangles, les vêtements, les bijoux et les sacs à l'écart des roues et des autres pièces mobiles.
- Soyez conscient que le repose-pieds peut, à tout moment, se coincer sur les trottoirs, les pentes raides ou autres obstacles et causer une instabilité avec BLUMIL.
- N'allez pas sur des surfaces supérieures à 10%.
- N'essayez pas de franchir un escalier avec votre BLUMIL GO, cela pourrait provoquer un accident.
- Évitez les surfaces recouvertes de glace, d'huile ou d'autres substances glissantes.
- Lors de l'utilisation et de l'entretien du Blumil, faites attention à ne pas vous coincer ou pincer une partie de votre corps avec les éléments de Blumil. Vous devez être très prudent. Après avoir réglé le Blumil, assurez-vous toujours que les boulons sont bien vissés.
- Éloignez les enfants de moins de 5 ans (risque d'étouffement).
- Protéger du feu et des produits inflammables.
- Ne chevauchez pas les flaques d'eau et évitez de mouiller le fauteuil roulant de toute autre manière.

ECRAN ET BOUTONS

Speed : Indique la vitesse de conduite

Mileage : Affiche la distance totale parcourue




Battery : Indique la capacité de la batterie restante. Composée de 5 bandes, chaque bande représente environ 20% de la charge totale de la batterie.

Lights : Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre la lumière

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton LED pour changer le mode de conduite :


- TURBO 30 km / h
- Tortue 10 km / h
- sans icône 16 km / h

AVERTISSEMENT: le mode *TURBO* est active à vos risques et périls.

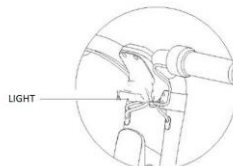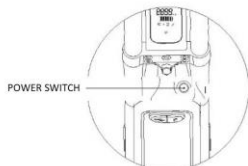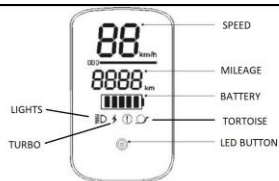


INSTALLER / RETIRER LA BATTERIE


1. Eteindre la BLUMIL GO

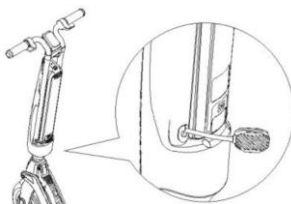


2. Déverrouiller et faire glisser la batterie vers le haut

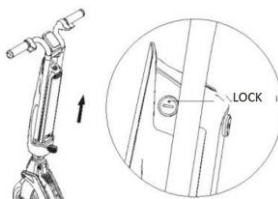

3. Retirer la batterie

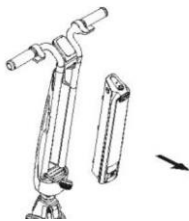


4. Insérer la batterie avec précaution et la verrouiller (LOCK)

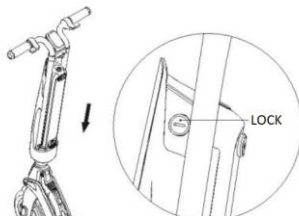

CHARGE


1. Eteignez l'appareil et déconnectez le câble d'alimentation
2. Ouvrez la protection en caoutchouc du port de charge
3. Branchez le câble de charge
4. Une fois chargé, remettre en place la protection en caoutchouc

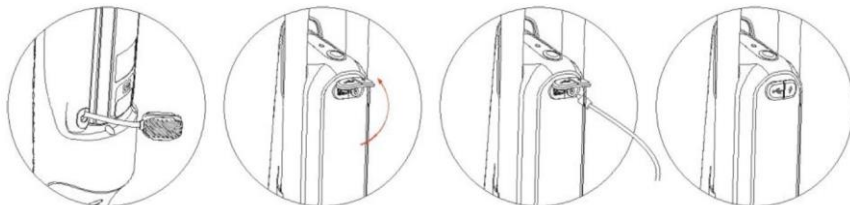

FIXER BLUMIL GO A UN FAUTEUIL ROULANT

Pour commencer à fixer BLUMIL GO au fauteuil roulant, déterminez d'abord la longueur

du support central en mesurant la distance entre votre axe central et l'avant de votre repose-pieds.

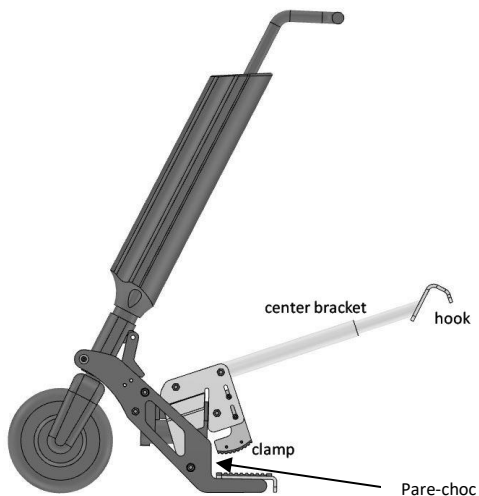


Le crochet (hook) doit se situer au-dessus de l'axe central des roues arrière de votre fauteuil roulant. (Dans certains modèles de fauteuil roulant, l'accès à cet axe est bloqué par une barre, en particulier sur les modèles Panthera. Dans ce cas, le crochet (hook) peut être fixé sur cette barre).

Si, en approchant, le support central de votre BLUMIL GO est coincé, vous devez le relever ou le baisser à l'aide du bouton **Connecter/Déconnecter**.

Si l'avant de votre repose-pieds est en contact avec le pare-choc de la BLUMIL GO, vous pouvez appuyer sur le bouton **Connecter**. L'avant du fauteuil roulant va commencer à se soulever. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la pince (clamp) repose sur le repose-pieds de votre fauteuil roulant.


Une fois fixé, assurez-vous que le système est fermement connecté.

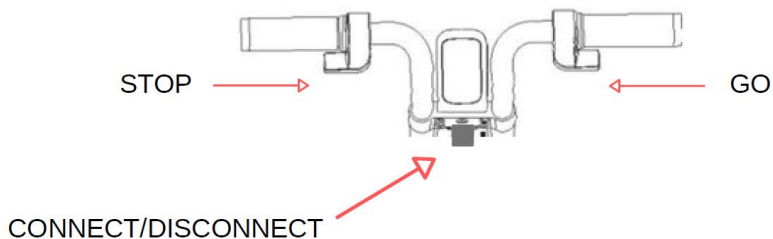


AVERTISSEMENT : *Si vous restez appuyé trop longtemps sur le bouton de connexion, une fois la BLUMIL GO fixée, vous risquez endommager le châssis de votre fauteuil roulant.*

Pour déconnecter le système, appuyez sur le bouton **déconnecter** jusqu'à ce que les roues avant du fauteuil roulant soient abaissées et que le support se soulève au-dessus de l'axe central de roues de votre fauteuil roulant. Vous pouvez ensuite retirer la BLUMIL GO de votre fauteuil.

Position correcte avant la connexion

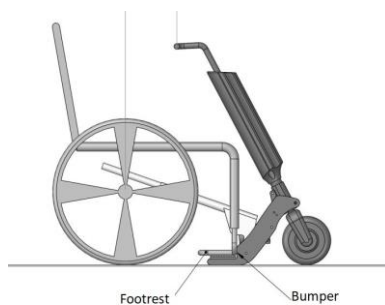

Connexion correcte

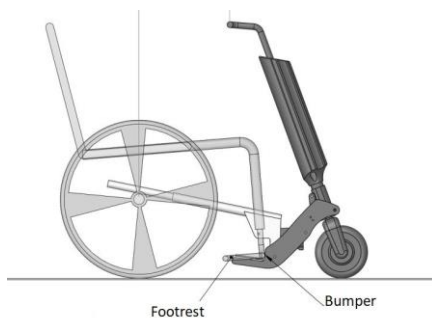

AJUSTEMENT DE LA FIXATION

La pince, après avoir connecté le support au fauteuil roulant, doit toujours appuyer fermement sur le repose-pieds et doit se situer au-dessus du tube avant du repose-pieds du fauteuil. En ajustant la position de la pince, vous modifiez également la hauteur à laquelle les roues du fauteuil roulant avant sont levées. Vous pouvez essayer différentes configurations pour trouver votre position de conduite et votre garde au sol optimales.


La longueur de la pince peut être ajustée en desserrant les deux vis de fixation et en réglant la longueur nécessaire. Après ajustement, serrez les vis fermement.

La pince peut être positionnée et tournée à 180 degrés. Il est important de choisir le meilleur ajustement pour votre fauteuil roulant, car tous les fauteuils roulants sont différents.


FAUTEUIL ROULANT AVEC REPOSE-PIEDS HAUT

Chaque fauteuil roulant étant un peu différent et adapté aux besoins spécifiques de l'utilisateur, des ajustements supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Si vous ne parvenez pas à vous approcher du pare-choc (bumper) avec votre fauteuil roulant, il peut être nécessaire d'utiliser les vis plus longues fournies (M8x60), en raison du blocage de la pince. Cela peut être fait en quelques étapes:

- 1- Retirez les 2 supports en caoutchouc en devissant les 2 vis M8x20.

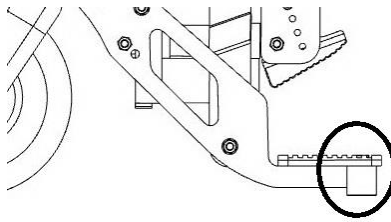


- 2- Insérez dans les trous les vis plus longues (additional screw) fournies.
- 3- Vissez fermement les écrous supplémentaires (1 de chaque côté) afin que les vis ne bougent pas.
- 4- Vissez les 2 écrous (nuts) restants (1 de chaque côté) environ de moitié; Ils seront utiles pour l'étape suivante.
- 5- Vissez les 2 caoutchouc aussi fermement que possible et bloquez-les avec les écrous que vous avez installé à l'étape précédente.

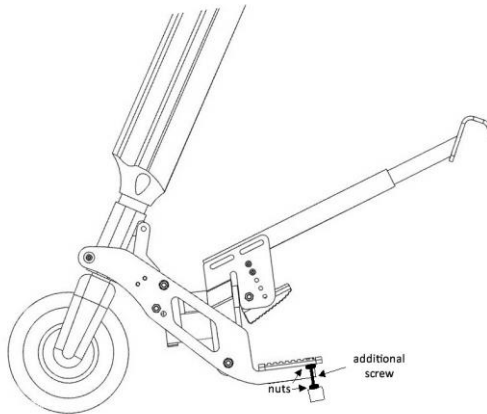

REGLAGE SUPPLEMENTAIRE

Dans le cas où, tous les réglages ci-dessus ne suffisent pas à verrouiller correctement votre repose-pieds, vous pouvez également modifier l'amplitude de la fixation centrale. Si vous n'avez pas besoin que la fixation centrale s'ouvre plus haut, mais que vous avez besoin qu'elle soit plus basse qu'en position fermée, procédez comme suit :

1. Retirez la vis qui maintient le vérin du trou 1 (hole 1) et insérez la dans le trou 2 (hole 2).

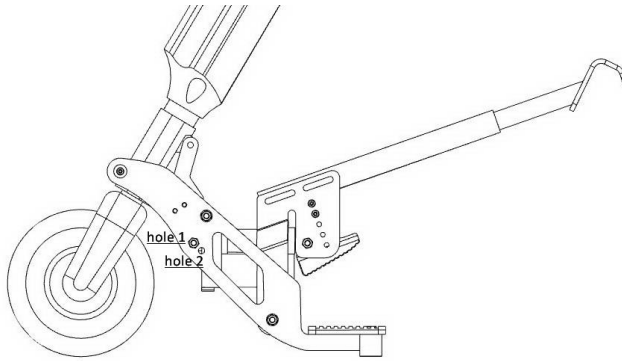

LA CONDUITE

Voici quelques règles de base à lire avant d'utiliser BLUMIL GO. Il doit être utilisé avec précaution. Portez une attention particulière aux avertissements et aux instructions contenus dans ce manuel.

Lors de la première utilisation de BLUMIL GO, commencez sur une surface plane avec une bonne adhérence, sans obstacle.

AVERTISSEMENT : *Avant de conduire, assurez-vous que les réglages ont été effectués conformément aux instructions.*

AVERTISSEMENT : *Ne conduisez pas sur un terrain difficile tant que vous n'avez pas d'expérience de conduite.*

Pour accélérer, appuyez sur l'accélérateur.

Pour ralentir ou arrêter, appuyez sur le frein. Pour arrêter complètement, vous devez attraper les roues arrière de votre fauteuil roulant avec vos mains.

Lorsque vous franchissez des pentes trop abruptes, le BLUMIL GO peut s'éteindre pour éviter toute surchauffe et tout endommagement du moteur.

MAINTENANCE DE LA BATTERIE

La batterie est la partie la plus importante du handbike. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, suivez les étapes ci-dessous:

1. Lisez attentivement les précautions sur l'étiquette de la batterie et suivez les instructions
2. Essayez de garder la batterie à une température ambiante entre 0 et 40°, ce qui améliorera ses performances. Évitez les températures inférieures à -20 degrés ou supérieures à 50 degrés.
3. Veuillez conserver la batterie dans un environnement frais et sec. Dans un environnement humide et fermé, le bloc-batterie peut être condensé et l'eau peut l'endommager.
4. Pendant l'utilisation quotidienne, essayez d'éviter que la batterie ne soit complètement déchargée. Veuillez charger le plus tôt possible lorsque l'écran LCD n'affiche que 10% à 20%. Si vous laissez la batterie déchargée, vous risquez de l'endommager de manière irréversible.

GARANTIE BLUMIL

Garantie limitée BLUMIL

BLUMIL GO est couvert par la garantie fabricant pendant une durée de 1 an contre tout défaut des matériaux et de fabrication, à compter de la date d'achat, et seulement pour l'acheteur d'origine en utilisation non commerciale. Toutes les pièces ou produits de remplacement installés conformément aux instructions du vendeur sont couverts par la garantie d'origine restante ou un délai maximal de 90 jours à compter de la date de réparation ou de remplacement, selon la durée la plus longue.

Procédure de prise sous garantie

Avant de renvoyer une pièce ou un produit sous garantie, vous devez d'abord contacter le revendeur certifié auprès duquel vous avez acheté votre produit BLUMIL. Si ce revendeur n'existe pas, vous devez contacter BLUMIL par courrier électronique à l'adresse info@blumil.com. Si la pièce ou le produit en question s'avère défectueux et

couvert par la garantie, vous serez tenu de renvoyer la pièce ou le produit à BLUMIL ou au revendeur agréé auprès duquel vous avez acheté votre produit BLUMIL. BLUMIL ou le revendeur agréé sera responsable de l'expédition de retour. Si le produit n'est pas couvert par la garantie, vous pouvez acheter une pièce de rechange et payer les frais d'expédition.

Exclusions de garantie

La garantie BLUMIL ne couvre pas et peut être annulée pour les défauts ou dommages résultant d'accidents, accidents, collisions, intempéries, dégâts des eaux, mauvaise utilisation ou abus, négligence, modifications, installation, utilisation ou maintenance non conforme.



B L U M I L